

НАМ ДОВЕРЯЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ!



Серия ультразвуковых
приборов P5 Newtron



Наши приборы ежедневно используются более чем в 100 странах мира

Подразделение Satelec входящее в дивизион Acteon Group является мировым лидером в разработке и производстве ультразвукового стоматологического оборудования и насадок. Большой опыт работы в этой области, постоянное инвестирование в разработки, тесное сотрудничество с врачами и профессионалами со всего мира является гарантом превосходности наших приборов.

Самый большой выбор оборудования

Satelec предлагает самую большую линейку ультразвуковых генераторов и насадок, более 70 видов для каждого типа наконечника.

Нам доверяют профессионалы!



НОВИНКА

Серия P5 Newtron Теперь с LED оптикой!

- Серия ультразвуковых генераторов P5 Newtron дает Вам возможность выбора своего прибора в зависимости от индивидуальных требований.

Контейнер для ирригации

- Большая вместительность (300 мл)
- Возможность использования стерильных растворов, таких как гипохлорит или хлоргексидин
- Ирригационная кассета длительного использования (более 1000 часов)

Простой

- Легко наполнять, даже во время процедуры
- Автоматическая продувка и промывка
- Легко чистить и дезинфицировать

P5
NEWTRON
LED
XS

Эргономичный

- Простое и удобное управление
- Бесшумная помпа
- Компактный


НОВИНКА

P5 Newtron XS LED

В полной комплектации:
с автономной ирригацией и LED светом

Наконечник со светом 100 000 Lux

- Превосходная видимость, даже в труднодоступных местах
- Холодный свет (6 000 - 7 000° K)
- Идеально подходит для работы с бинокляром
- Мощные LED
- Может автоклавироваться при 134° C

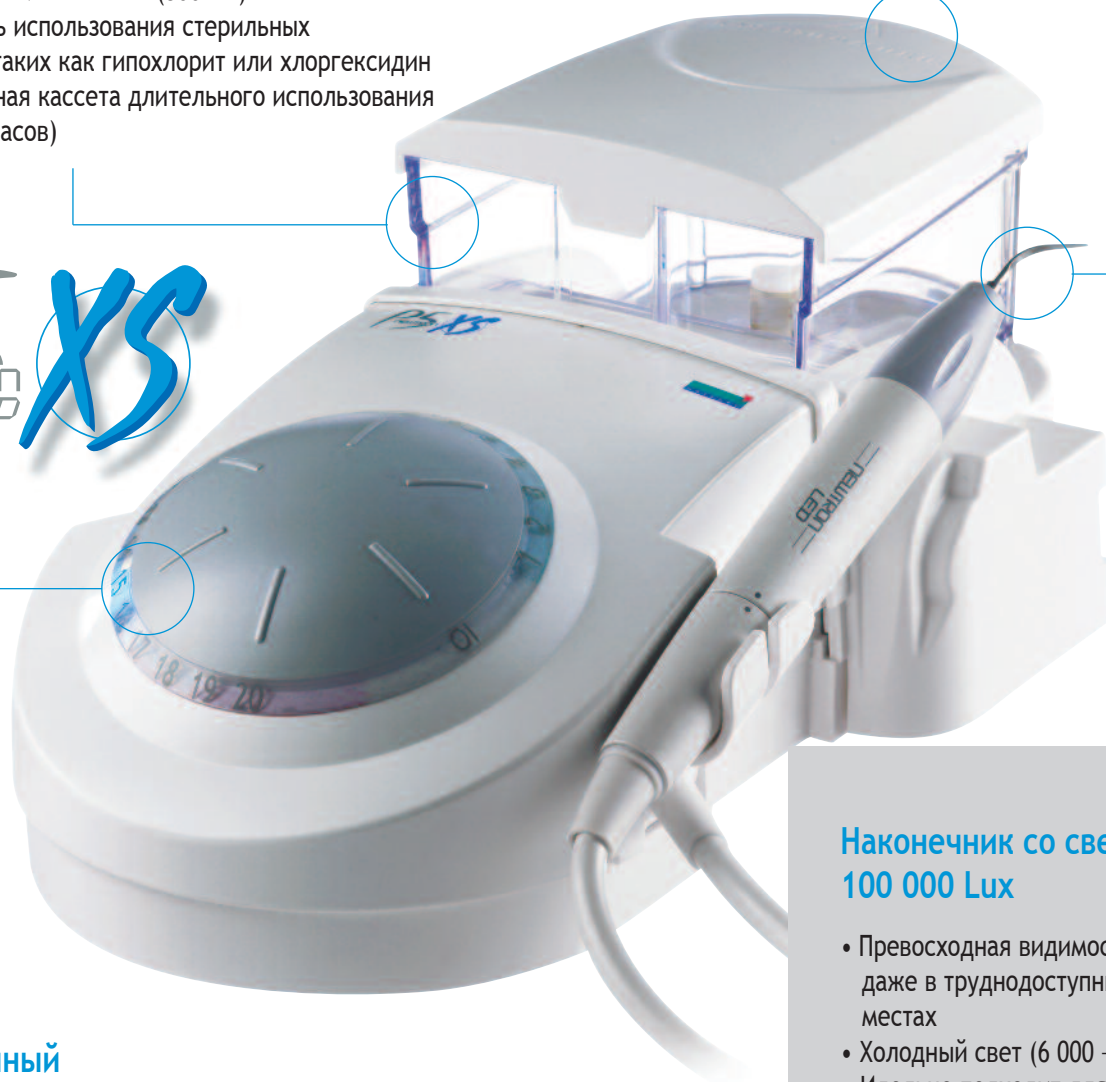



P5
NEWTRON XS

P5 Newtron XS

Большая портативность благодаря автономной ирригации

Внимание!

Только при использовании оригинальных насадок компания Satelec может гарантировать корректную и продолжительную работу приборов!



P5 NEWTRON
LED

НОВИНКА

P5 Newtron LED

Newtron LED технология является наиболее продаваемой во всем мире

Компактная и удобная



P5 Newtron

Сконцентрированная мощность



P5 NEWTRON

Стерильный набор

Опционально на приборах P5 Newtron XS и P5 Newtron XS LED.
Набор включает металлическую базу, автоклавируемый держатель и три универсальных одноразовых стерильных линии.

Полная стерильность

Ирригационную линию очень легко установить в случае хирургического вмешательства требующего полной стерильности.

Newtron технология

Система
автонастройки

+

Система
пушпул

+

принцип
обратной отдачи

=

Cruise Control®
Система

Скорость

Автоматическая подстройка частоты 28 кГц - 36 кГц

Насадка всегда настраивается на правильную частоту

→ Гарантированная эффективность в любом виде лечения

Мягкость

Контроль амплитуды колебаний насадки

Лечение осуществляется мягко и безболезненно

→ Без риска повреждения тканей и с большим комфортом для пациента

Мощность

Настройка мощности в реальном времени

Мощность подстраивается в соответствии с сопротивлением насадки

→ С минимальным давлением, более точно, с меньшей утомляемостью рук


Управляемый: Система Cruise Control®

Автоматическая регулировка частоты и мощности

→ Полный контроль


Система Цветовой Кодировки

Для большего удобства работы каждая насадка имеет цветовой код соответствующий мощностному режиму выбранному на приборе.

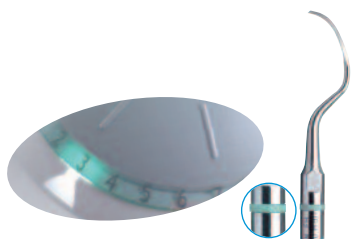


Зеленый

Низкая мощность, низкая амплитуда.
Деликатное лечение:
Пародонтология

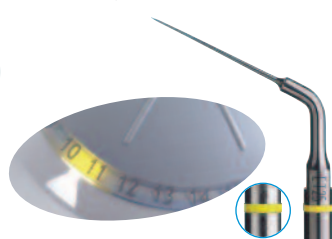


Желтый

Средняя мощность, средняя амплитуда.
Точное лечение:
Эндодонтия

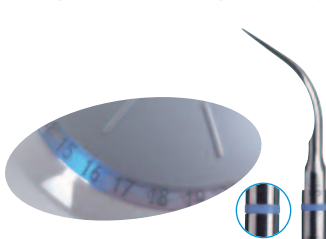

Синий


Высокая мощность, высокая амплитуда.
Профилактика:
Скалинг

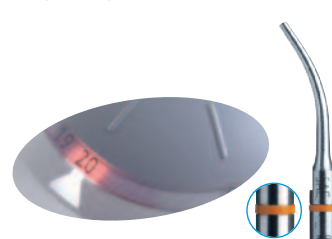

Оранжевый

Очень высокая мощность, максимальная амплитуда.
Специальное лечение:
Снятие коронок

Серия ультразвуковых приборов P5 Newtron

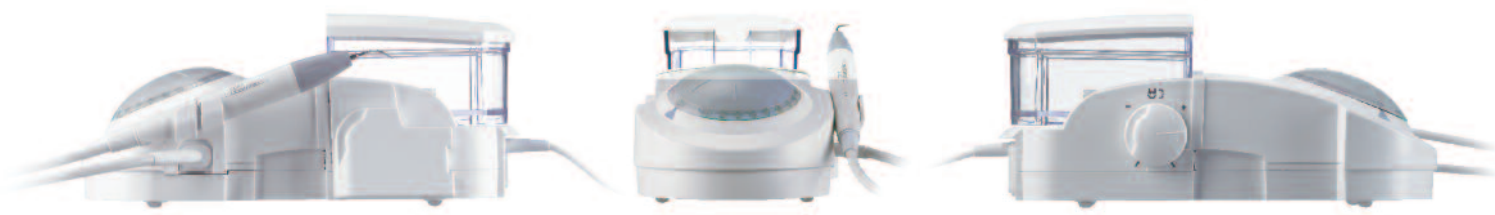

Технические характеристики

P5 NEWTRON

P5 NEWTRON
LED

P5 NEWTRON
XS

P5 NEWTRON
LED XS

Встроенная ирригация	Нет (подключается к источнику)	Нет (подключается к источнику)	Есть	Есть
LED наконечник	Нет	Есть	Нет	Есть
Вольтаж	100В/115В/230В - 50Гц/60Гц	100В/115В/230В - 50Гц/60Гц	100В/115В/230В - 50Гц/60Гц	100В/115В/230В - 50Гц/60Гц
Классификация оборудования	Класс II, тип ВF	Класс II, тип ВF	Класс I, тип ВF	Класс I, тип ВF
Частота ультразвука	28 кГц до 36 кГц	28 кГц до 36 кГц	28 кГц до 36 кГц	28 кГц до 36 кГц
Ирригация	-	-	7 до 40 мл/мин.	7 до 40 мл/мин.
Давление воды	1 до 5 бар	1 до 5 бар	-	-
Размеры (г х ш х в)	170 мм х 150 мм х 80 мм	170 мм х 150 мм х 80 мм	290 мм х 158 мм х 125 мм	290 мм х 158 мм х 125 мм
Вес	1380 гр	1610 гр	1700 гр	2120 гр
Ножная педаль (г х ш х в)	95 мм х 70 мм х 30 мм (150 гр)	95 мм х 70 мм х 30 мм (150 гр)	95 мм х 70 мм х 30 мм (150 гр)	95 мм х 70 мм х 30 мм (150 гр)
Кабель наконечника	2000 мм	2000 мм	2000 мм	2000 мм

Стерилизация наконечников и аксессуаров (ключей, контейнеров и т.д.) в автоклаве производится согласно стандарту EN ISO-17665-1.

При температуре: 134°C (273°F); Давлении: 2 бара (29 P.S.I.);

Время стерилизации: 18 минут. Для большей информации смотрите инструкцию.

Список дистрибьюторов в России:

Dentex (Дентекс)
Москва,
Ул. Климашкина, д.8
Телефон: (495) 974-30-30
Факс: (495) 255-98-00
<http://www.dentex.ru>

Medenta (Медента)
Москва,
Новохорошевский
проезд, д.25
Телефон:(499) 946-46-09,
946-46-10
Факс: (499) 946-39-99
<http://www.medenta.ru>

Coral (Корал)
Санкт-Петербург,
Ул. Звенигородская,
д.2/44-9
Телефон:(812) 327-21-77,
712-43-04
Факс: (495) 737-09-33
<http://www.coralspb.ru>

Стома-Денталь
Москва,
Малая Трубецкая ул.
д.28 стр.2
Телефон: (495) 781-00-76
Факс: (495) 781-00-36
<http://www.dent.ru>

**Хабаровский офис
Стома-Денталь**
Хабаровск,
ул. Волочаевская,
д.153, оф.152
Телефон: (4212) 30-55-63
Факс: (4212) 32-51-31